



Láminas de silicona



Gel de silicona



- Eficaz en el tratamiento de todo tipo de cicatrices, tanto antiguas como recientes: **queloides, hipertróficas, traumas, cirugías generales, quemaduras, procedimientos cosméticos, abdominoplastías y cesáreas.**
- Eficacia comprobada para **prevenir la formación de cicatrices hipertróficas y queloides**
- Eficacia comprobada para el **tratamiento de cicatrices hipertróficas y queloides**

Las láminas **NewGel+** son láminas de gel de **silicona 100% de grado medicinal** que comprobadamente reducen, aplanan, suavizan y hacen desvanecer las cicatrices tanto antiguas como recientes. ^{(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)}



Herida luego de escisión de carcinoma basocelular



Cicatriz resultante antes de NewGel+E



Después de 7 semanas de uso de NewGel+E (gel de silicona)



Mama derecha, luego de 7 semanas sin tratamiento NewGel+



Mama izquierda, luego de 7 semanas con tratamiento NewGel+



Salud y belleza en la piel



Láminas de silicona



Gel de silicona



Mecanismo de acción

→ La **lámina de silicona NewGel+** mejora el tejido cicatricial mediante una combinación de **oclusión** (sella y protege la cicatriz), **hidratación**, **elevación de la temperatura** de la piel y **leve presión continua**.



Se pueden observar mejoras a partir de las 3 semanas de uso. Los resultados óptimos se observan al cabo de 3/4 meses.





Láminas de silicona




Gel de silicona



NewGel+ láminas de silicona está disponible en 6 formatos en versiones color beige y transparente



2,5 cm de diámetro
(NG 180 y NG 380)

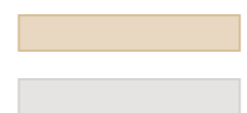

2,5 cm x 15,2 cm
(NG 101S y NG 301S)



12,7 cm x 15,2 cm
(NG 301 y NG 101)



NewGel+E se presenta en pomos x 15 gramos de gel de silicona.



Areolas
(NG-120 Beige y NG-320 Transparente)



Anclas
(NG-126 Beige y NG-326 Transparente)



Lollypops
(NG-124 Beige y NG-324 Transparente)

→ **Beige:** Tela adicional con Factor de Protección Solar 15+
Transparente: Menos perceptible.


NewGel+™

Láminas de silicona


NewGel+E™

Gel de silicona

APROBADO
FDA

→ Modo de uso

1

Lavar y secar el área a tratar.

2

Retirar la **lámina NewGel+** del envase.
Si fuera necesario cortar o recortar la **lámina NewGel+** de modo que permita cubrir al menos 1 cm. alrededor del área a tratar.

3

Retirar el antiadherente y aplicar la **lámina NewGel+** con el adhesivo hacia abajo, directamente sobre la cicatriz.

Para obtener **óptimos resultados** proporcionar **24 hs. al día de cobertura** usando las **láminas NewGel+** siempre que sea posible y el **gel NewGel+E** en momentos que no se utilicen

(No usar ambos productos al mismo tiempo, de lo contrario la lámina perdería su capacidad de adhesión)



VALUGE

Salud y belleza en la piel



NewGel+™

Láminas de silicona



NewGel+™ E

Gel de silicona

APROBADO
FDA



→ Recomendaciones de uso

- La lámina se debe utilizar todos los días de 6 a 24 horas por día. Se debe retirar una vez al día para inspeccionar, lavar y secar el sitio en tratamiento.
- No aplicar las láminas sobre heridas abiertas ni sobre piel resquebrajada.
- **NewGel+** como **NewGel+E** debe empezar a utilizarse una vez que el médico tratante haya determinado que el sitio quirúrgico está completamente cerrado, se retiraron las suturas y no hay exudado.
- **NewGel+ láminas** o la combinación de éste con **NewGel+E en gel** se debe usar un mínimo de 2 meses. Podrían observarse mejoras adicionales si se prolonga su uso hasta 6 meses.

VALUGE

Salud y belleza en la piel



Láminas de silicona



Gel de silicona

APROBADO
FDA


→ Recomendaciones de uso

Cuando la lámina **NewGel+** se seca o pierde sus propiedades adhesivas, se puede lavar con agua corriente y un jabón suave y dejarla secar al aire libre, para volver a utilizar.


- Mientras no estén en uso las láminas deben guardarse en su envase original o en envase seguro
- **NewGel+** se debe reemplazar cuando se deteriora, desintegra o ya no se adhiere.
- Cada lámina **NewGel+** dura hasta 4 semanas.



2,5 cm de diámetro



2,5 cm x 15,2 cm



12,7 cm x 15,2 cm



LAS CICATRICES PUEDEN DESVANECERSE

APROBADO
FDA

→ Beneficios de las láminas NewGel

- Clínicamente probadas para reducir y aplanar todo tipo de cicatrices incluso queloides e hipertróficas
- Son autoadhesivas e indoloras
- Flexibles y cómodas, fáciles de usar
- Duraderas y reutilizables
- Resultados visibles a las 3-4 semanas de uso
- La más alta calidad por su tecnología de fabricación: silicona 100% grado medicinal sometida a estrictas pruebas de Biocompatibilidad y Bioseguridad humana.

Tratamiento eficaz, seguro y fácil de usar

[Ver bibliografía](#)



Fabricadas por: New Medical Technology, Inc. de Illinois EEUU

VALUGE

Salud y belleza en la piel

